

Szybki test
do jakościowego wykrywania
antygeny SARS-CoV-2
w wymazach z nosogardzieli.

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro. Przeczytać uważnie instrukcje użytkowania.

✓ **Łatwy w użyciu**

wymaz z nosogardzieli jest analizowany w kilku krokach

✓ **Szybki**

wynik wykrywania antygenów SARS-CoV-2 otrzymuje się w ciągu 15 minut

✓ **Wygodny**

można go przechowywać w temperaturze pokojowej lub w lodówce (2-30 ° C)

✓ **Kompletny**

nie ma potrzeby stosowania żadnego dodatkowego wyposażenia; wszystkie niezbędne elementy są zawarte w zestawie

✓ **Posiada oznaczenie**




PARAMETRY TESTU:


CZUŁOŚĆ: 96 % osób badanych z wynikiem dodatnim miało potwierdzony dodatni wynik badania PCR

SWOISTOŚĆ: 100 % osób badanych z wynikiem ujemnym miało potwierdzony ujemny wynik badania PCR.


DOKŁADNOŚĆ: 98 % osób badanych miało wynik zgodny z wynikiem testu PCR (tzn. osoby z dodatnim wynikiem PCR miały dodatni wynik testu immunologicznego oraz osoby z ujemnym wynikiem PCR miały ujemny wynik testu immunologicznego)

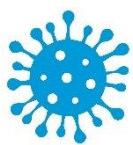


WYKONANIE*

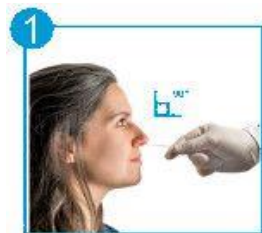


Włożyć wymazówkę **poziomo** do jamy nosowej na **głębokość ok. 3 cm**

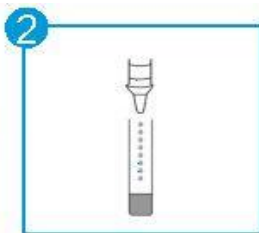

Do próbki do ekstrakcji próbki wlać **10 kropli (0,3 ml)** buforu ekstrakcyjnego.

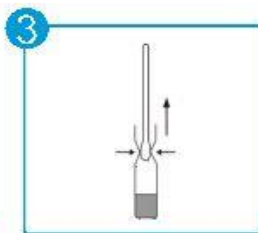

Włożyć wymazówkę do próbki ekstrakcyjnej, **obracać ją** w próbce przez **około 1 min.**

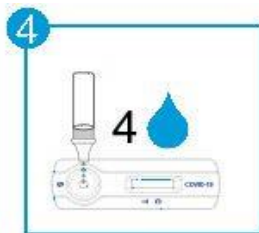

Zakręcić korek próbki ekstrakcyjnej i nanieść **4 krople** roztworu z tej próbki w zagłębienie S płytki testowej.



Po **15 minutach** od naniesienia odczytać wynik. Nie odczytywać wyniku po 20 minutach lub dłużej.

* Aby zapoznać się z pełną procedurą, przeczytaj instrukcję


Wobec takich wyzwań kluczowym problemem staje się szybka i wiarygodna diagnostyka wirusa SARS-CoV-2. Powszechnie stosowana referencyjna metoda Real-Time PCR wykrywająca obecność wirusowego materiału genetycznego (RNA) w wymazach z gardła lub nosogardzieli daje wiarygodne wyniki, ale niestety wymaga unikalnej aparatury i wysoko wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego przez co trwa długo i jest dość kosztowna.

Testy immunologiczne wykrywające obecność antygenów wirusowych w wymazach nie wymagają żadnej specjalistycznej aparatury, są szybkie (czas rozwijania 15 min!) – i co najważniejsze mogą być wykonane w warunkach ambulatoryjnych przez pracowników służby zdrowia np. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych itp. Dzięki rozwojowi nowoczesnych metod immunologicznych skuteczność takich testów jest coraz lepsza i zbliża się do skuteczności testów genetycznych.


W odróżnieniu od testów wykrywających przeciwciała testy anty-SARS-CoV-2 wykrywające antygen wirusowy informują o tym, że pacjent już w chwili badania jest zakażony!

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS to szybki chromatograficzny test immunologiczny służący do jakościowego wykrywania obecności antygeny wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z jamy nosowo-gardłowej.

Czas wykrywania antygeny trwa zaledwie 15 minut!

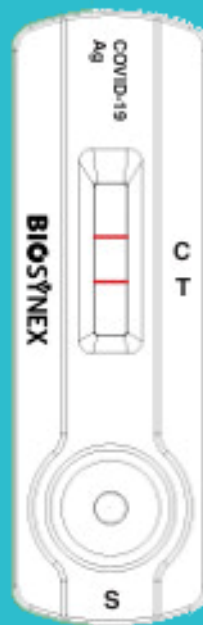


WYNIK

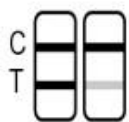

POZYTYWNY



NEGATYWNY

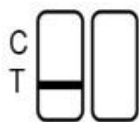

NIEPRAWIDŁOWY

Więcej na: www.witko.com.pl

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

- 25 płytek testowych
- 2 fiołki z buforem ekstrakcyjnym
- 25 jałowych wymazówek
- 25 próbek ekstrakcyjnych
- 1 statyw do próbek
- Instrukcja w j. polskim