



Dwa zestawy RT-PCR do wykrywania:

- SARS-CoV-2
- Trzech rodzajów wirusów układu oddechowego (SARS-CoV-2, grypa A i B oraz RSV)



Kompletne rozwiązanie – od pobrania próbki do uzyskania wyników

- Otwarte zestawy do amplifikacji zwalidowane na większość systemów Real-Time PCR
- Zestawy do amplifikacji mogą być używane razem z zestawami do ekstrakcji BIOSYNEX lub z RNA izolowanym inną metodą

Szybkie wyniki

- Uprozczone przygotowanie próbki w ciągu zaledwie 15 minut bez konieczności ekstrakcji / oczyszczania RNA
- Całkowita procedura od pobrania próbki do uzyskania wyników w mniej niż 1 godzinę 30 minut

Łatwe używanie

- Bufor do lizy i roztwór MasterMix do Real-Time PCR w gotowych, wstępnie napełnionych płytkach
- Wymaga mniej niż 10 minut czasu pracy laboranta na jedną płytkę




BIOSYNEX AMPLIQUICK® Przebieg procesu

BEZ AUTOMATYCZNEJ EKSTRAKЦИИ



Szybkie przygotowanie próbek do RT-PCR

BIOSYNEX AMPLIQUICK® Viral Sample Collection

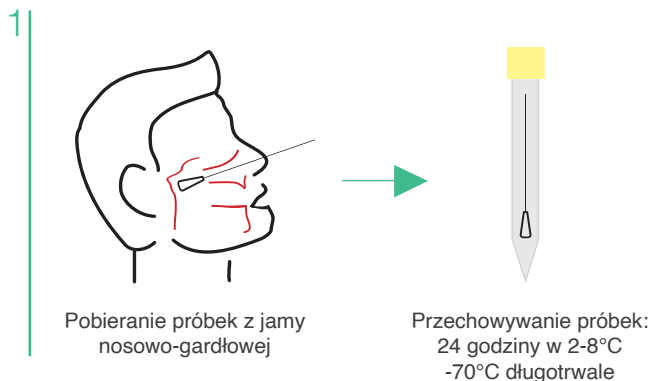


BIOSYNEX AMPLIQUICK® Viral Lysis



Amplifikacja RT-PCR

BIOSYNEX AMPLIQUICK® SARS-CoV-2 oraz
BIOSYNEX AMPLIQUICK® Respiratory Triplex

3

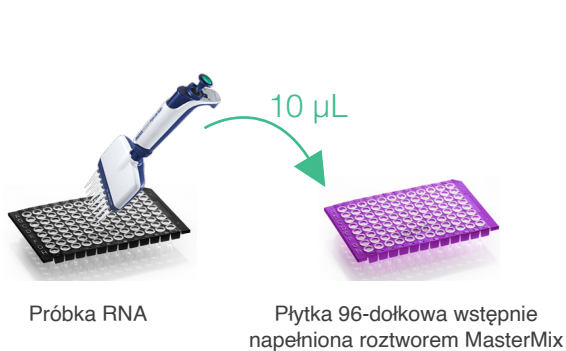


Proces amplifikacji PCR w zaledwie 49 min¹

Z AUTOMATYCZNĄ EKSTRAKcją




Tradycyjne przygotowanie próbek do RT-PCR

Zwykłe wymazówki i medium transportowe dla wirusów

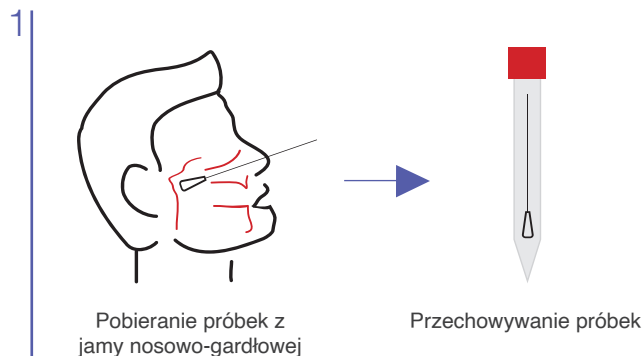

Standardowe metody ekstrakcji i oczyszczania RNA

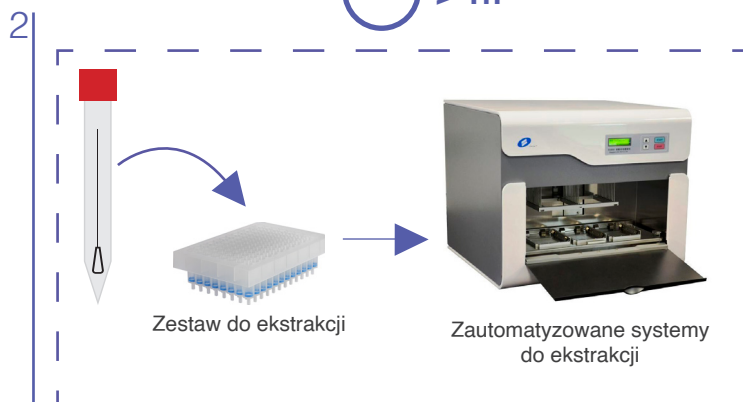

¹ Korzystanie z amplifikacji w trybie FAST w aparacie QuantStudio 5 (Applied Biosystems).




BIOSYNEX AMPLIQUICK® Zestawy



BIOSYNEX AMPLIQUICK® Szybkie przygotowanie próbek


BIOSYNEX AMPLIQUICK® Viral Sample Collection REF 3150060

- 100 wymazówek
- 100 probówek z medium transportowym
- Instrukcja używania

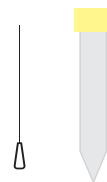

BIOSYNEX AMPLIQUICK® Viral Lysis REF 3150059

- 5 x płytka 96-dołkowa wstępnie napełniona buforem do lizy
- Przezroczyste zakrywki do uszczelniania płytek
- Instrukcja używania

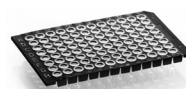

Producent: BIOSYNEX S.A. (Francja)



BIOSYNEX AMPLIQUICK® Zestawy do amplifikacji

	BIOSYNEX AMPLIQUICK® SARS-CoV-2	BIOSYNEX AMPLIQUICK® Respiratory Triplex
Nr katalogowy	3150058	3150061
Patogeny i geny docelowe	SARS-CoV-2: RdRp & E	SARS-CoV-2: RdRp & E Grypa A: M Grypa B: HA RSV: M
Kontrola wewnętrzna	RNase P	
Wygodna forma	Gotowa płytka 96-dołkowa wypełniona mieszaniną MasterMix	
Liczba pacjentów na płytkę	Do 94 pacjentów (oraz kontrole)	Do 46 pacjentów (oraz kontrole)
Granice wykrywalności	• Standardowo izolowany RNA: SARS-CoV-2: 1 kopia / µl • BIOSYNEX AMPLIQUICK® Viral Lysis: SARS-CoV-2: 2 kopie / µl	• Standardowo izolowany RNA: SARS-CoV-2: 1 kopia / µl Grypa A&B: 0.5 kopia / µL RSV: 1 kopia / µl • BIOSYNEX AMPLIQUICK® Viral Lysis: SARS-CoV-2: 2 kopie / µl Grypa A&B: 2 kopie / µl RSV: 1 kopia / µl
Kompatybilne termocyklery	0,1 ml dla płytek niskoprofilowych, z kanałami detekcji FAM, HEX i Cy5 QuantGene 9600 (BIOER), CFX96™ (Bio-Rad), QuantStudio5 (Applied Biosystems), LighCycler®480 (Roche), DT lite 48/96 (DNA Technology)	
Zawartość zestawu	5 x płytka 96-dołkowa 5 przezroczystych folii do uszczelniania płytek	
Kontrole dodatnie i ujemne	1 kontrola dodatnia (+) SARS-CoV-2 1 kontrola ujemna (-)	1 kontrola dodatnia (+) SARS-CoV-2 1 kontrola dodatnia (+) Grypa A i B oraz RSV 1 kontrola ujemna (-)

Producent: BIOSYNEX S.A. (Francja)



Szybkie testy diagnostyczne COVID-19




BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS



Szybki test chromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2

- Wiarygodne wyniki:
 - Czułość 96%
 - Specyficzność 100%
- Łatwy w użyciu
 - Przeprowadzenie oznaczenia wymazu z nosogardzieli zaledwie w kilku krokach
- Brak reakcji krzyżowych z :
 - Łagodnymi koronawirusami 229E, OC43, NL63, HKU1
 - Wirusami grypy A i B; paragrypy(1-4); RSV A i B
 - Bakteriami C. pneumoniae, M. pneumoniae, L. pneumophila

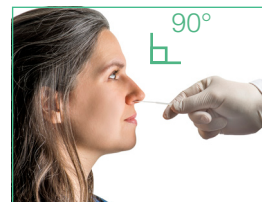

Σ 25 testów

⌚ 15 minut

✓ Wymazówki w zestawie

🦠 Białko N.

🌡️ 2 - 30°C

NR KATALOGOWY

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS REF: SW40006

Producent: Biosynex SWISS SA (Szwajcaria)



BIOSYNEX COVID-19 (IgG/IgM) BSS



Szybki chromatograficzny test immunologiczny do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-COV-2

- Wiarygodne wyniki:
 - Czułość 97,4% dla IgM i 94,9% dla IgG 13 dni po wystąpieniu objawów
 - Specyficzność 100%
- Zwalidowany dla pełnej krwi (z nakłucia żyły lub z opuszki palca), surowicy lub osocza
- Wymaga tylko 10 µl próbki
- W zestawie kroplomierz kapilarny



Σ 25 testów

⌚ 10 minut

✓ W zestawie kroplomierz kapilarny

🦠 IgG/IgM

🌡️ 2 - 30°C

NR KATALOGOWY

BIOSYNEX COVID-19 (IgG/IgM) BSS REF: SW40005

Producent: Biosynex SWISS SA (Szwajcaria)

BIOSYNEX

BIOSYNEX SA
22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - France
Telefon: +33 3 88 77 57 52
Faks: +33 3 88 78 76 78
E-mail: export@biosynex.com
www.biosynex.com



Dystrybutor:
WITKO Sp z o.o.
92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 143
Telefon: (42) 676 34 35
E-mail: bok@witko.com.pl
www.witko.com.pl

Wyroby medyczne do diagnostyki *in vitro*. Przeczytaj uważnie instrukcję używania.

FLY_3150058_PL_V01202011R01
Rev : 11/20